



製造廠名稱：巧醫生科技股份有限公司

製造廠地址：南部科學工業園區

台南市新市區南科三路13號4樓之C室

藥商名稱：巧醫生科技股份有限公司

藥商地址：南部科學工業園區

台南市新市區南科三路13號4樓之C室

1. 請確認包裝資訊（如診所、醫師及病患姓名…等）是否正確。

2. 本產品為一次性使用產品，請勿重複性使用。

3. 本產品效期為一個月，請確認包裝標示的製造日期及有效期間。
若超過保存期限，請勿使用本產品。



non-sterile

衛部醫器製壹字第006575號

“巧醫”牙科手用器械（未滅菌）
“CHOICE” Dental hand instrument (Non-sterile)

00 牙醫診所--000 醫師/病患:000

產品型號: 1B-CH01

製造批號: 1B4000

訂單號碼: 2017040301

製造日期: 20170403

有效期間: 一個月

製造廠名稱: 巧醫生科技股份有限公司


製造廠地址: 南部科學工業園區台南市新市區南科三路13號4樓之C室

藥商名稱: 巧醫生科技股份有限公司

藥商地址: 南部科學工業園區台南市新市區南科三路13號4樓之C室

4. 保存時，請放置於乾燥的室溫下存放。
請避免暴露於紫外光(陽光)或超過65°C環境下容易導致變形。

5. 本產品分為兩大部分，一為接觸牙體的底座，其他為固定各牙位矯正器的定位Jig，請確認收到所有零件、並確認外觀是否有破損或斷裂的情形。

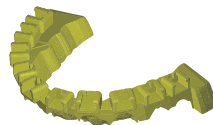

底座示意图



定位Jig示意图


6. 使用前，建議先行拆除定位Jig後，針對接觸病患的底座部分以消毒水浸泡消毒。

本產品請勿使用高溫高壓消毒。

本產品建議的消毒水及消毒時間如下表所示：

消毒水種類	建議浸泡消毒時間
75%酒精	30分鐘
Cidex	20-30分鐘
OPA	20-30分鐘
EDS	20-30分鐘

7. 請依照定位Jig上標示之牙位安裝對應牙位的矯正器。

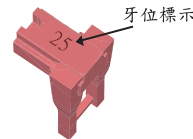

8. 請將定位Jig依牙位插入相對應之滑槽後，放置牙模上確認矯正器位置是否正確。



9. 將本產品放置病人口內時，請確認是否可以穩定戴入及矯正器位置是否正確。

10. 請將定位Jig往外拉至約一半的位置,並在矯正器與牙齒之接觸面塗上適量的光固化樹脂(light curing resin)。



11. 將定位Jig完全推進滑槽底部後,照射UV光數秒後加以固化。
(請依照所使用的光固化樹脂特性與相關使用說明)



12. 確認矯正器與牙齒穩定黏合後,可拆除或破壞定位Jig,並移除底座。

“巧醫”牙科手用器械(未滅菌)

“CHOICE” Dental hand instrument (Non-sterile)

製造廠名稱：巧醫生技股份有限公司

製造廠地址：南部科學工業園區

台南市新市區南科三路13號4樓之C室

藥商名稱：巧醫生技股份有限公司

藥商地址：南部科學工業園區

台南市新市區南科三路13號4樓之C室

巧醫生技股份有限公司

南部科學工業園區台南市新市區南科三路13號4樓之C室

電話：06-5057289

傳真：06-5057301


官方網站：<http://www.wearechoice.com/>



“巧醫”牙科手用器械(未滅菌)

“CHOICE” Dental hand instrument (Non-sterile)

使用說明書 User Guide

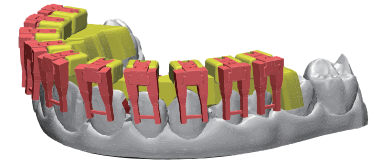

使用前請務必詳閱原廠使用說明書並遵照指示使用